

DB detekčný králičí/myšací duálny systém - HRP

Určené iba pre in vitro diagnostiku (IVD)

Kat. číslo: DB DET SYS (100 ml - 500 testov)

Informácie o produkte:

Skladovanie: 2-8°C

Expirácia: vid' na etikete

DB králičí/myšací duálny-HRP detekčný systém je sekundárnou protilátkou na báze polyméru: HRP konjugovaný, dizajnovaný pre aplikáciu v imunohistochemii. Používa sa s predriedenou alebo koncentrovanou primárnou protilátkou (vyprodukovanou králikom alebo myšou) rôznych výrobcov.

Obsah:

HRP králičí/myšací (100 ml) pripravený roztok obsahuje sekundárnu protilátku konjugovanú s HRP, rozoznávajúc špecificky králičie a/alebo myšacie IgG. Dodáva sa v roztoku, ktorý obsahuje stabilizačný proteín a konzervačné latky.

Aplikácia:

Po inkubácii rezu tkaniva s primárnou protilátkou a po premývacích procedúrach aplikujte DB detekčný systém po dobu 25 - 30 minút.