

DB Roztok na revitalizáciu antigénu pH6 – 10x

Určené iba pre *in vitro* diagnostiku (IVD)

Kat. číslo: DB RETCIT - 250 (250 ml) 10x koncentrovaný
DB RETCIT - 500 (500 ml) 10x koncentrovaný

Informácie o produkte:

Skladovanie: 4-8 °C
Expirácia: viď na etikete
Konzervačná látka: 0,5% NaN₃
Pufor: 100 mM citrátový pufor, pH6; 0,5% Tween-20

DB roztok na revitalizáciu antigénu pH6 sa používa v imunohistochemii k optimalizácii účinnosti protilátky za tepla revitalizovaným antigénom vo formalíne fixovaných a parafíne zaliatych tkanivách.

Postup:

Pracovný roztok pripravte nariadením koncentráту DB RETCIT v pomere 1:10 v destilovanej vode. Tento roztok je možné používať do 3 mesiacov pri teplote skladovania 4-8°C.

Upozornenia:

1. Určené iba pre odborné použitie.
2. Používajte pri práci ochranné prostriedky a vyvarujte sa kontaktu s očami a pokožkou.