

## DB Roztok na revitalizáciu antigénu pH9 – 10x

Určené iba pre *in vitro* diagnostiku (IVD)

**Kat. číslo:** DB RETRIS - 250 (250 ml) 10x koncentrovaný  
DB RETRIS - 500 (500 ml) 10x koncentrovaný

### Informácie o produktoch:

**Skladovanie:** 4-8°C  
**Expirácia:** vid' na etikete  
**Konzervačná látka:** 0,5% NaN<sub>3</sub>  
**Pufor:** 100 mM Tris-HCl, pH9; 0,5% Tween-20, 10 mM EDTA

DB roztok na revitalizáciu antigénu pH9 sa používa v imunohistochemii k optimalizácii účinnosti protilátky za tepla revitalizovaným antigénom vo formalíne fixovaných a parafíne zaliatych tkanivách.

### Postup:

Pracovný roztok pripravte nariadením koncentráту DB RETCIT v pomere 1:10 v destilovanej vode. Tento roztok je možné používať do 3 mesiacov pri teplote skladovania 4-8°C.

### Upozornenia:

1. Určené iba pre odborné použitie.
2. Používajte pri práci ochranné prostriedky a vyvarujte sa kontaktu s očami a pokožkou.